



MediRox offre plasmi di controllo liofilizzati normali e patologici che includono D-Dimero, Proteina C, Proteina S e Fattori con valori di riferimento per i reattivi dei principali produttori dedicati all'emocoagulazione.

Un solo flacone di controllo Eximius MediRox può rimpiazzare sino a quattro plasmi di controllo.

---

*Esistono due versioni di controlli:*

*Eximius Basic (PT, PTT, FIB, ATIII, TT e D-Dimero)*

*Eximius PLUS (PT, PTT, FIB, ATIII, TT, D-Dimero, PS, PC e Fattori)*

---

*I controlli sono di fondamentale importanza per la verifica dei dati di laboratorio e dovrebbero essere forniti da "terze parti" (ISO 15189:2012 e CLSI C24-A3:2006).*

*Più parametri inclusi in un solo controllo riducono i costi, i tempi di lavoro e assicurano minor spreco di materiale di controllo.*

### Vantaggi Principali

- Plasma umano
- Livelli patologici costituiti da plasma realmente patologico e non diluito
- Prodotti liofilizzati
- Più parametri in un solo controllo
- Minor costo e facilità d'uso
- Controlli multiparametro che includono D-Dimero, Proteina S, Proteina C e Fattori
- Nuova Common Assay Technology
- Lunga durata. Validità fino a 30 mesi dalla data di produzione
- Lunga stabilità dopo ricostituzione sino a 54 ore

### Esempio Valori

Product No/Product Name		Level 1	
Prothrombin Time (PT)		Mean	+ 2SD
MediRox CH131-10 Owens PT	INR	1,05	N/A
20301800 HemosIL PT RecombiPlasTin 2G	INR	0,89	0,89-1,09
Hemostil PT RecombiplasTin	INR	1,01	0,90-1,12
HemosIL PT-Fib HS Plus	INR	1,02	0,82-1,12
Stago/Roche STA Neoplastin plus	INR	1,00	0,93-1,10
Sclero PT	INR	1,05	0,99-1,17
Siemens PT Innovin	INR	1,09	1,00-1,18
Siemens Thrombomil S	INR	1,02	0,91-1,13
MediRox CH131-10 Owens PT	Seconds	24	N/A
MediRox MRX130 PT Quick	Seconds	14	N/A
20301800 HemosIL PT RecombiPlasTin 2G	Seconds	11	N/A

### Utilizzo e Stabilità

Si tratta di un plasma liofilo prodotto seguendo rigidi standard di controllo di qualità. I controlli ancora confezionati sono stabili fino alla data di scadenza conservati a una temperatura tra i 2-8° C.

Una volta ricostituiti i controlli **MediRox** sono stabili sino a 54 ore (per i parametri).

Per il controllo ricostituito e congelato è necessario verificare la funzionalità e la stabilità dell'aliquota prima dell'uso.

### Informazioni per l'ordine:

MRX170	Eximius Control Basic Triple Set	4x1 mL L1 4x1 mL L2 2x1 mL L3	Normale Patologico Severamente Patologico
MRX171	Eximius Control Basic Level 1	10x1 mL	Normale
MRX172	Eximius Control Basic Level 2	10x1 mL	Patologico
MRX173	Eximius Control Basic Level 3	10x1 mL	Severamente Patologico
MRX180	Eximius Control PLUS Triple Set	4x1 mL L1 4x1 mL L2 2x1 mL L3	Normale Patologico Severamente Patologico
MRX181	Eximius Control PLUS Level 1	10x1 mL	Normale
MRX182	Eximius Control PLUS Level 2	10x1 mL	Patologico
MRX183	Eximius Control PLUS Level 3	10x1 mL	Severamente Patologico

Prodotto e garantito da **MediRox** 

SE - 611, 82 Nyköping  
Phone: +46 (0)155 45 44 10  
Fax: +46 (0)155 26 30 11  
Email: info@medirox.se

Distribuito in Italia da **P.R.I.S.M.A. srl** 

Via Cavour, 42 I - 20865 Usmate Velate (MB)  
Tel. +39 039 6076708  
Fax +39 039 672186  
Email: info@prismaonline.it , spalmieri@prismaonline.it