



Coagulometro Veterinario PoCT

- ✓ **semplicità e immediatezza d'uso**
- ✓ **risultati affidabili**
- ✓ **card a secco con sangue intero**
- ✓ **portabilità 100%** (batterie al litio ricaricabili)

Wondko

Wondfo Wholly-owned Company

distribuito in Italia da ASSEL srl



Step by Step

Step by Step

Accensione



Riscaldamento



450µL di campione, mescolare



Inserire la Card

dispensare 20µL di campione



Esecuzione

Elaborazione del Risultato




P.R.I.S.M.A.
www.prismaonline.it

Principio di Funzionamento

Il reagente specifico è già predosato a secco sulla card.

Dopo una rapida incubazione e l'aggiunta del campione, lo strumento procede con una miscelazione automatica fino alla formazione e rilevamento del coagulo.

Il risultato del Test eseguito apparirà sul display touch screen e potrà essere memorizzato e stampato.

Sistema di misura ottico "Golden Standard"



Conservazione dei kit a Temperatura Ambiente



Pregi

Semplicità d'uso senza manutenzione



Accuratezza e Affidabilità dei Risultati



Applicazioni

Screening dell'attività coagulativa della via intrinseca e estrinseca

Monitoraggio T.A. e veleni ad azione scoagulante

Monitoraggio di patologie quali tumori, bruciature, infezioni e epatiti

Monitoraggio della coagulazione intravascolare, trombosi e relativa terapia

Test Disponibili

Test	Volume Campione *	Range di Riferimento		Temper. conserv.	scad. mesi	REF 12 pz.
		Cane	Gatto			
PT	20µL	5-15s	6-15s	4°~30°C	18	V211
INR	20µL	INR:0.5-1.6	INR:0.5-1.6	4°~30°C	18	
APTT	20µL	15-45s	15-43s	4°~30°C	18	V212
FIB	20µL	1-3g/L	1-2.5g/L	4°~30°C	18	V213
TT	20µL	10-100S	10-100S	4°~30°C	18	
ACT	20µL	50-150s	50-140s	4°~30°C	18	